

Gebruikte materialen

Polyester 48%, polyamide 15 %, viscose 13 %, polypropyleen 13%, elasthan 10%, overige 1%

Angabe des verwendeten Materials

Polyester 49 %, Polyamide 15 %, Viskose 13 %, Polypropylen 13 %, Elasthan 10 %

Reinigingsvoorschriften (NL)

Handwas in max. 30°C water. Niet bleken. Niet chemisch reinigen. Niet geschikt voor de droger. Verwijder voor het wassen de pelotte en sluit alle klittenbanden om beschadigingen aan andere kledingstukken te voorkomen en een optimale hechting van de klittenbanden te garanderen. Wij adviseren de bandage in de meegeleverde waszak te wassen.

Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise (DE)

Handwäsche bei max. 30° C warmem Wasser. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht geeignet für den Trockner. Vor dem Waschen bitte die Pelotte entfernen und alle Klettverschlüsse schließen, so dass das Hakenklettband andere Materialien nicht beschädigen kann und eine optimale Haftung des Klettbands garantiert bleibt. Wir empfehlen, die Bandage im mitgelieferten Waschbeutel zu waschen.




Maattabel Baskocare bekkenbandage / Maßtabelle Baskocare-Beckenorthese

Art.-Nr.	Per / VE	Maat / Größe	Hoogte frontaal Höhe vorne	Hoogte dorsaal Höhe hinten	Heupomvang Hüftumfang
900-S	Stuk/Stück	small	11,5 cm	27 cm	85 – 95 cm
900-M	Stuk/Stück	medium	11,5 cm	27 cm	95 – 105 cm
900-L	Stuk/Stück	large	11,5 cm	27 cm	105 – 115 cm
900-XL	Stuk/Stück	X-large	11,5 cm	27 cm	115 – 125 cm

BASKOCARE

BEKKENBANDAGE
BECKENORTHESE

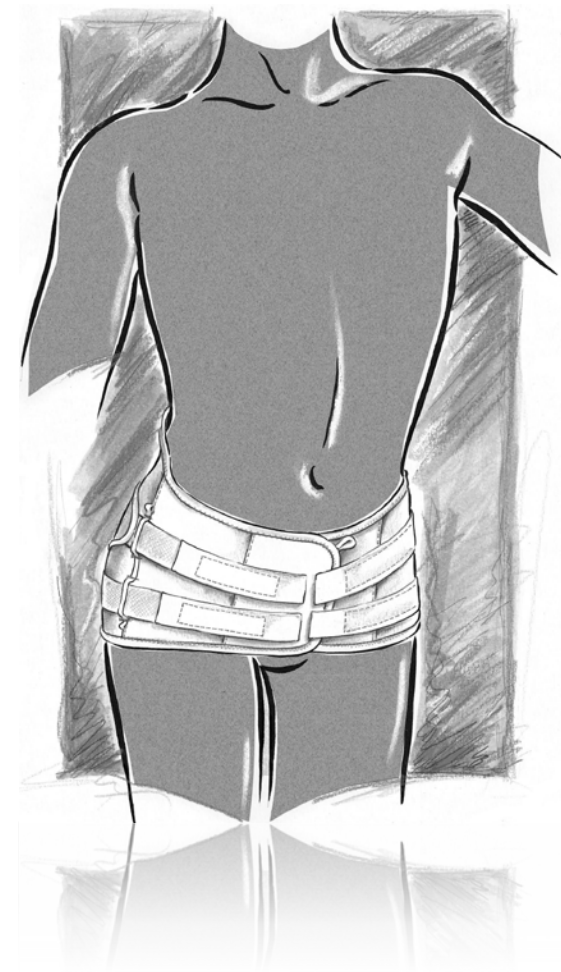

Gebruiksrichtlijnen

Uw arts schrijft de bekenbandage voor en bepaald de behandelduur. De gestelde dagelijkse gebruiksduur dient strikt nageleefd te worden. Controleer regelmatig uw huid op drukplekken of irritaties en neem direct contact op met uw arts of instrumentmaker indien dit het geval is. De bandage is niet geschikt voor gebruik door meerdere personen.

Beoogd gebruik van het product / Indicaties

De bandage wordt ingezet ter stabilisatie van de bekken bij aandoeningen aan het bekken en het statische deel van de rug. De bandage zorgt voor een verhoogde druk en ondersteuning op de gehele bekkenring. Daardoor worden pijnklachten tijdens het zitten en lopen verminderd. Vooral aan vrouwen tijdens en na de zwangerschap biedt de Baskocare bekkenbandage een optimale ondersteuning. De bandage wordt bij onderstaande indicaties ingezet:

- Bekkenring fractuur (ICD10: S32.83)
- Coxarthrose (ICD10: M19.9)
- Heupkopnecrose (ICD10: M87.85)
- Iliosacrale syndroom (ICD10: M53.3)
- Pericoxitis (ICD10: M13.15)
- Symphyolyse (ICD10: S33.4/O71.6)
- Symphyse ruptuur (ICD10: S33.4/O71.6)

Extra productinformatie / inzetgebied

De bandage is niet geschikt om in zout water gebruikt te worden.

Gebruikersrisico's en contra-indicaties

De bandage mag niet op drukplekken of andere huidirritaties-/aandoeningen gedragen worden. Overige contra-indicaties zijn niet bekend.

Onderhoudsadvies

De klittenbanden dienen vrij te blijven van vervuiling, stofresten e.d. om een goede hechting te blijven garanderen.

Aanleggen van de Bandage

De bandage wordt gebruiksklaar geleverd maar dient bij het voor de eerste maal omdoen van de bandage door een instrumentmaker of ander vak personeel uitgelegd te worden. Na het bepalen van de juiste maat door de heupomvang te meten neemt u de bandage uit de verpakking en controleert u of deze compleet en onbeschadigd is.

Verpakkingsinhoud:

1 bandage, 1 rugpelotte en 1 waszakje.

Aanleggen van de Bandage

Stap 1 - Maak het klittenband van de niet-elastische banden los van de basisband zonder deze uit de passanten te halen.





Stap 2 - Positioneer de basisband zo om het lichaam dat de onderkant van het achtergedeelte over de billen en de voorzijde met de sluiting onder de buik over het schaambeen komt te liggen. Sluit vervolgens de basisband zodat deze comfortabel strak om het lichaam zit.

Stap 3 - Neem de uiteinden van de onderste band in beide handen en trek deze stevig naar voren en sluit deze op het klittenband aan de voorzijde van de basisband zo laag mogelijk (de banden kunnen ook over elkaar gesloten worden afhankelijk van de gewenste kracht en omvang van de heup).

Stap 4 - Herhaal Stap 3 met de bovenste niet-elastische banden en sluit deze net boven de onderste banden.

U kunt stap 2 t/m 4 ook liggend uitvoeren.

Aanbrengen rugpelotte: Indien gewenst plaatst u de pelotte op de speciaal hiervoor aangebrachte klittenbandstrook. Plaats hierbij de smalle kant aan de onderzijde.

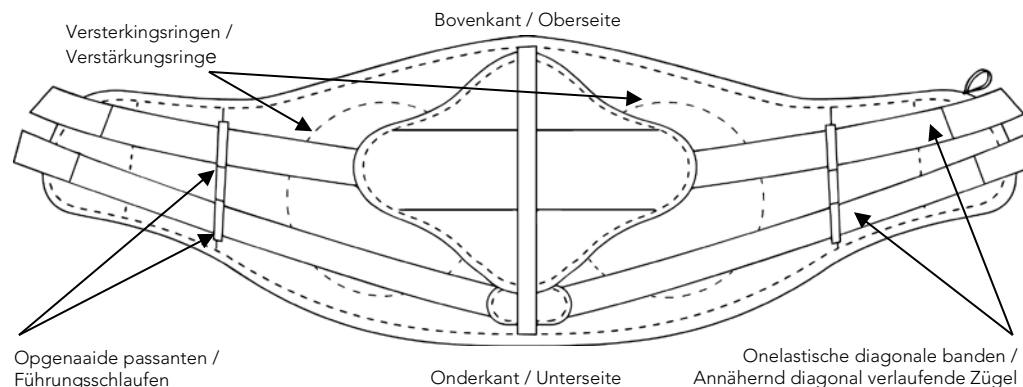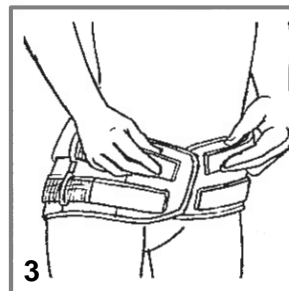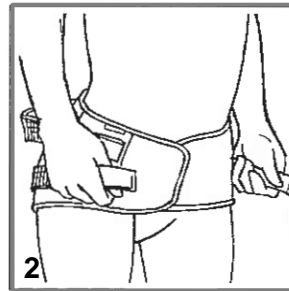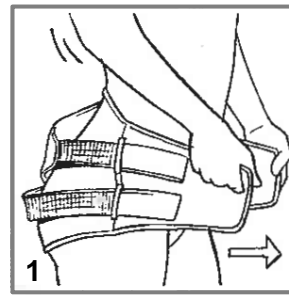

Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die Beckenorthese und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt oder Techniker. Die Orthese ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die Orthese wird zur Beckenstabilisierung bei Beschwerden im Becken- und im statischen Rückenbereich eingesetzt. Die Anwendung bewirkt einen erhöhten Druck auf den gesamten Beckenring. Dadurch werden Schmerzen beim Sitzen oder Laufen gelindert. Insbesondere Frauen während und nach der Schwangerschaft bietet die Baskocare-Beckenorthese eine optimale Unterstützung. Die Anwendung erfolgt bei folgenden Indikationen:

- Beckenringfraktur (ICD10: S32.83)
- Coxarthrose (ICD10: M19.9)
- Hüftkopfnecrose (ICD10: M87.85)
- Iliosakralsyndrom (ICD10: M53.3)
- Pericoxitis (ICD10: M13.15)
- Symphysenruptur (ICD10: S33.4/O71.6)
- Symphysensprengung (ICD10: S33.4/O71.6)

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Beckenorthese darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Die Orthese darf nicht auf Druckstellen oder gereizter Haut getragen werden. Sonstige Kontraindikationen sind nicht bekannt.

Wartungshinweise

Die Klettbinden sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren.

Lieferung der Orthese

Die Orthese wird gebrauchsfertig ausgeliefert, jedoch sollte das Anlegen der Orthese bei der ersten Anpassung durch einen Techniker oder medizinisches Fachpersonal erklärt werden. Nach Bestimmung der korrekten Größe durch das Umfangsmaß der Hüfte, nehmen Sie die Orthese aus der Verpackung und kontrollieren Sie zuerst, ob die Orthese vollständig und unbeschädigt ist.

Lieferumfang:

1 Orthese, 1 Rückenpelotte und 1 Waschbeutel.

Anlegen der Orthese

Schritt 1: Lösen Sie die 4 Klettverschlüsse der annähernd diagonal verlaufenden Zügel von der Orthese, belassen diese aber in den Schlaufen.

Schritt 2: Legen Sie die Orthese um den Körper. Die Unterkante des Rückenteiles sollte dabei in Höhe des Steißbeins und das Vorderteil auf der Symphyse liegen (Abb. 1). Verschließen Sie nun die Orthese mit dem frontalen Klettbandverschluss. Die Orthese sollte nun fest, aber angenehm anliegen.

Schritt 3: Der Druck auf den Beckenring lässt sich über die annähernd diagonal verlaufenden Zügel justieren. Führen Sie hierzu nun die beiden unteren Zügel mit beiden Händen so tief wie möglich zum vorderen Flauschteil und befestigen Sie diese (Abb. 2). Die Zügel können abhängig von der gewünschtem Zugkraft übereinander gelegt werden.

Schritt 4: Befestigen Sie nun die oberen beiden Zügel direkt über den unteren Zügeln (Abb. 3).

Sie können Schritte 2 bis 4 auch liegend ausführen.

Einsatz der Rückenpelotte: Bei Bedarf kann die Pelotte auf dem speziell hierfür vorgesehenen Flauschbandstreifen angebracht werden. Die schmale Seite ist dabei unten anzubringen.