

Anleitung zur Anbringung von StepLock und InterLock

An jeder belasteten Orthese sollten stets zwei Sperrgelenke angebracht sein. Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass aus Sicherheitsgründen immer beide Sperren aktiviert werden sollten.

StepLock und InterLock sind in zahlreichen Gelenk- und Schienengrößen erhältlich, um unterschiedlichen Patientengrößen und -aktivitäten angepasst werden zu können. Da der Orthopädiemechaniker mit jedem Einzelfall am besten vertraut ist, liegt die Entscheidung darüber, welche Größe sich für jede Situation am besten eignet, bei ihm.

Um Ihnen die Anbringung zu erleichtern, werden die Gelenkschrauben bei der Herstellung nicht mit einem Gewindesicherungsmittel versehen. Sie sollten aber unbedingt ein flüssiges Gewindesicherungsmittel, z.B. Loctite™ oder Vibratite™, auftragen, um die Schrauben vor der Lieferung der Orthese an den Patienten zu sichern.

Die Gelenkköpfe sind chemisch mit einem Nickelüberzug versehen worden, um die Oberfläche beständig zu festigen und gleitfähig zu machen. Obwohl diese Beschichtung äußerst haltbar ist, sollte darauf geachtet werden, dass sie durch den Einsatz von Schleifgeräten oder Schraubstöcken nicht verkratzt wird.

Die Gelenke müssen vor dem endgültigen Anpassen der Orthese geschmiert werden. Der Patient sollte unbedingt auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, die Gelenke beim Tragen der Orthese von Verschmutzungen freizuhalten und diese zu schmieren. Weiterhin sollte eine Nachuntersuchung nach 6 Monaten angesetzt werden. Benutzen Sie ausschließlich Originalschrauben und -zubehör, verwenden Sie keine Ersatzlösungen.

Der optionale **Bail Kit ist nur zur Verwendung mit InterLock vorgesehen**. Wenn Sie mit StepLock einen Fernauslösemechanismus verwenden möchten, benutzen Sie den Lever Release Kit, Art.-Nr. LRK512SM oder LRK1619LG. Dieser kann auch mit InterLock eingesetzt werden.

Bail Kit-Artikelnummer

Artikelnummer

IMAC Bail Kit

Lever Release Kit Artikelnummer

Artikelnummer

LRK512 small, geschikt voor SL/IL 512

LRK1619 large, geschikt voor alle andere maten