



Universal Hemi-Sling

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und Warnungshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch.



Schritt 1:

Halten Sie die Bandage und die separaten Bänder am „O“-Ring fest. Führen Sie den „O“-Ring über den Kopf. Legen Sie den nicht eingeschränkten Arm in die Handgelenkmanschette, so dass der „O“-Ring auf der Rückseite des Halses liegt.



Schritt 2:

Schieben Sie den beeinträchtigten Ellenbogen in die Ellenbogenmanschette bis zum Bandverschluss.



Schritt 3:

Führen Sie die nicht beeinträchtigte Hand durch die Handgelenkmanschette zur beeinträchtigten Seite und führen Sie diese in die Handgelenkmanschette.



Schritt 4:

Sichern Sie die Verbindungs-lasche an der Vorderseite beider Manschetten. Die Schultergurtlänge ist durch die Schiebescnalle einstellbar.

Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise:

Vor dem Waschen bitte alle Klettverschlüsse schließen. Handwäsche, warmes Wasser, nicht bleichen, spülen, an der Luft trocknen.

Warnung:

Wenn Sie Schmerzen, Schwellungen oder ungewöhnliche Reaktionen feststellen, während Sie dieses Produkt verwenden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dieses Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet. Es gibt keine Garantie dafür, dass durch die Nutzung dieses Produkts Verletzungen vermieden werden.



Medical Specialties, Inc.
4600-K Lebanon Rd. Charlotte, NC 8227
Tel: +1 704 694 2434 Fax: +1 704 694 9060
E-mail: request@medspec.com

EC REP

EU Authorized Rep.
Basko Healthcare
Pieter Liefinckweg 16
NL-1505 HX, Zaandam rev 1/14

