
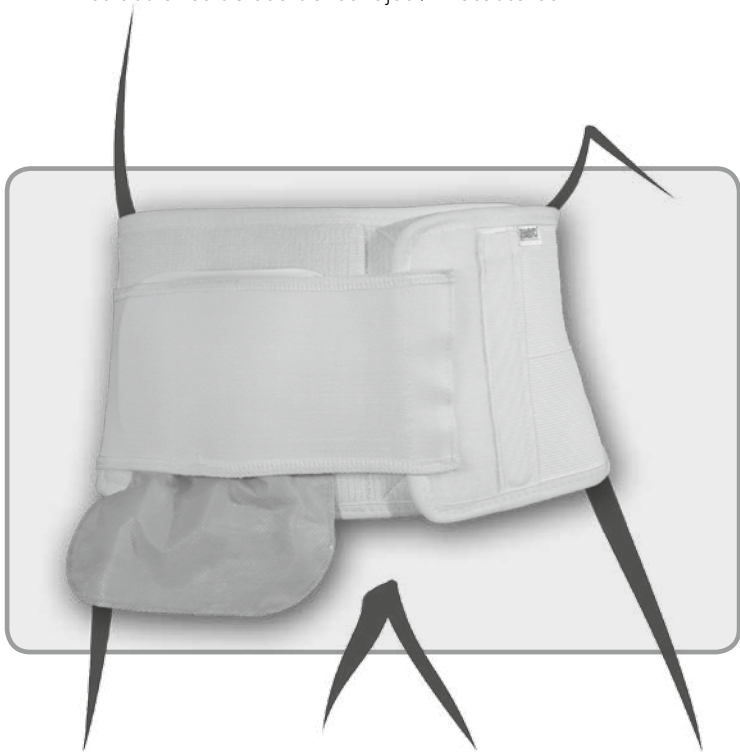


Basko
Healthcare


Stomacare

Gebrauchsanleitung Bandagen / Protector
Gebruiksaanwijzing bandagen / Protector
User instructions Support Belts / Protector
Användarinstruktioner Stomibandage / Protector
Bruksanvisning Stomibrokkbelte / Protector
Brugerinstruktioner Stomibælte / Protector
Sovitusohjeet / Avanneliivi / Protector
Istruzioni d'uso della fascia / Protector
Mode d'emploi bandages / Protector
Instrucciones de uso de las fajas / Protectoras

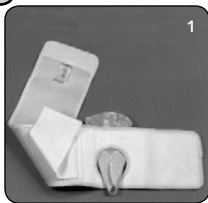



A

1

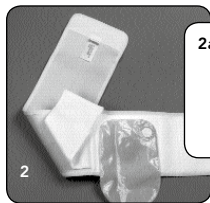

2

2a

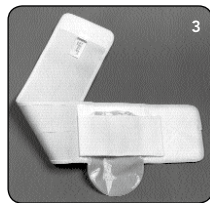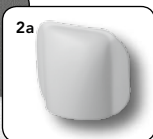


3

B


4



5

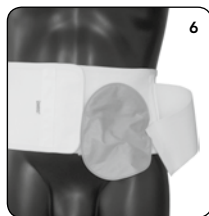

6

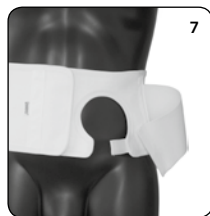


7

C


8



9

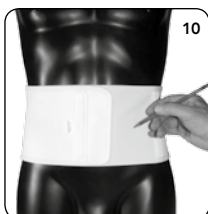D


10

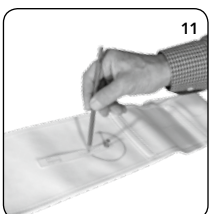

11




12

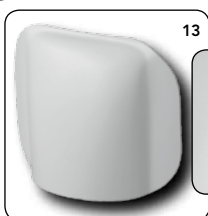E

13



14

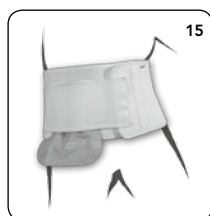

15

A Standard-Modelle**Anlegen der Bandage**

- 1) **Abb. 1:** Lösen Sie den Klettverschluss der Prolapsabdeckung. Falten Sie den Stomabeutel am unteren Ende und führen diesen von innen nach außen durch die Stomaöffnung.
- 2) **Abb. 2:** Der Stomabeutel wird nun komplett durch die Stomaöffnung gezogen. Eventuelle Befestigungslaschen des Beutels liegen hinter der Öffnung.
- 3) **Abb. 2a:** Optional kann nun der Stomacare-Protector (Zubehör) angebracht werden (Anleitung siehe unten).
- 4) **Abb. 3:** Die Bandage mit der gewünschten Spannung anlegen und mittels des Klettverschlusses schließen. Im Anschluss befestigen Sie die Prolapsabdeckung über dem Stomabeutel.

B EasyOpener-Modelle**Anlegen der Bandage**

Abb. 1-3: Befolgen Sie die Schritte 1) bis 4) wie unter A (Standard-Modelle) beschrieben.

Wechseln des Stomabeutels

- 1) **Abb. 4:** Lösen Sie den Klettverschluss der Prolapsabdeckung.
- 2) **Abb. 5:** Wenn vorhanden, lösen Sie den Stomacare-Protector von der Bandage.
- 3) **Abb. 6:** Heben Sie den Stomabeutel etwas nach vorne und öffnen Sie die spezielle Klettverschlussöffnung unterhalb der Stomaöffnung.
- 4) **Abb. 7:** Lösen Sie die Befestigungslaschen des Beutels von der Haut und nehmen Sie den Beutel ab. Zum Anlegen eines neuen Beutels befolgen Sie bitte die Schritte wie oben beschrieben.

C Irrigations-Modelle**Anlegen der Bandage**

- 1) **Abb. 8:** Die Bandage mit der gewünschten Spannung anlegen.
- 2) **Abb. 9:** Den Klettverschluss schließen.

D EasyCut-Modelle**Festlegen/Ausschneiden der Stomaöffnung**

- 1) **Abb. 9:** Lösen Sie den frontalen Klettverschluss und positionieren Sie die Bandage mit der gewünschten Spannung am Patienten. Stellen Sie sicher, dass die Flauschfläche das Stoma abdeckt.
- 2) **Abb. 10:** Markieren Sie mit einem Stift die Mitte der Stomaöffnung auf der Flauschfläche. Beachten Sie dabei, dass ausreichend Velours zur Befestigung der Prolapsabdeckung/des Protectors vorhanden ist.
- 3) **Abb. 11:** Nehmen Sie die Bandage ab und legen Sie diese flach hin. Verwenden Sie nun die mitgelieferte Schablone und markieren Sie, abhängig von der Größe des Beutelsystems, einen Kreis oder ein Oval auf der Flauschfläche.
- 4) **Abb. 12:** Schneiden Sie mit einer scharfen Schere den markierten Bereich aus. Das Velours-Material franzt nicht aus und verfügt über eine ausreichende Steifigkeit zur optimalen Unterstützung.

Anlegen der Bandage

Falten Sie den Stomabeutel am unteren Ende und führen diesen von innen nach außen durch die Stomaöffnung. Befolgen Sie nun die Schritte 2) bis 4) wie unter A (Standard-Modelle) beschrieben.

E Protector

Der Stomacare-Protector ist ein Zubehör und bietet bei Aktivitäten (z.B. beim Sport, Autofahren) einen zusätzlichen Schutz vor Druck und unbeabsichtigten Kräfteinwirkungen auf das Stoma. Der Protector lässt sich an allen Stomacare-Bandagen befestigen.

Abb. 13: Der Protector wird per Klettband (Streifen rechts und links auf der Innenseite) an der Vorderseite der jeweiligen Stomacare-Bandage befestigt.

Abb. 14: Positionieren Sie den Protector über der Stomaöffnung. Achten Sie darauf, dass der Stomabeutel seitlich völlig umschlossen ist. Der Stomabeutel sollte unterhalb des Protectors raushängen.

Abb. 15: Ziehen Sie nun die Prolapsabdeckung mit gewünschter Spannung über den Protector und befestigen Sie das Klettband. Der Protector muss vor dem Waschen der Bandage herausgenommen werden.



Basko Healthcare
P. Liefstinckweg 16
NL 1505 HX Zaandam
Phone +31 75 613 15 13



Basko Healthcare

Pieter Liefstinckweg 16 | NL-1505 HX Zaandam
Phone: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: sales@basko.com | Internet: www.basko.com