

Wirbelsäulen-Streck-Apparat

(für die Benutzung an der Tür)

Montage Anleitung

Der Apparat wird in Einzelteilen geliefert.
Das Paket hat folgenden Inhalt:

- Aufhängebügel
- Schnur mit Schlaufen
- Bandagenbügel
- Glissonbandage (Bandage mit Klettverschluss)
- Wasserreservoir mit deutlicher Kilogrammangabe, versehen mit einem Sicherheits-verschluß
- Gerader Bügel für Wasserreservoir

Schnur

Führen Sie die Schnur von unten in die viereckige, hinterste Öffnung des Aufhängebügels. Es empfiehlt sich, die Schlaufe zusammenzudrücken, bevor Sie diese durch den Aufhängebügel führen.


Bandage

Führen Sie den gebogenen Bügel durch die Schlaufe, welche sich an der Vorderseite des Aufhängebügels befindet.

Haken Sie jetzt die 2 Metallringe der Bandage in die Einkerbungen, so daß die Bandage den Kopf gut umschließt.

Wasserreservoir

Führen Sie die Schlaufe (kommt aus dem hinteren Teil des Aufhängebügels) von oben durch die mittlere Öffnung (oben) am Wasserreservoir. Jetzt den geraden Bügel mit der Einkerbung nach unten in das Wasserreservoir schieben, so daß er durch die Schlaufe geführt wird. Bitte darauf achten, daß die Schlaufe genau in der Einkerbung liegt.

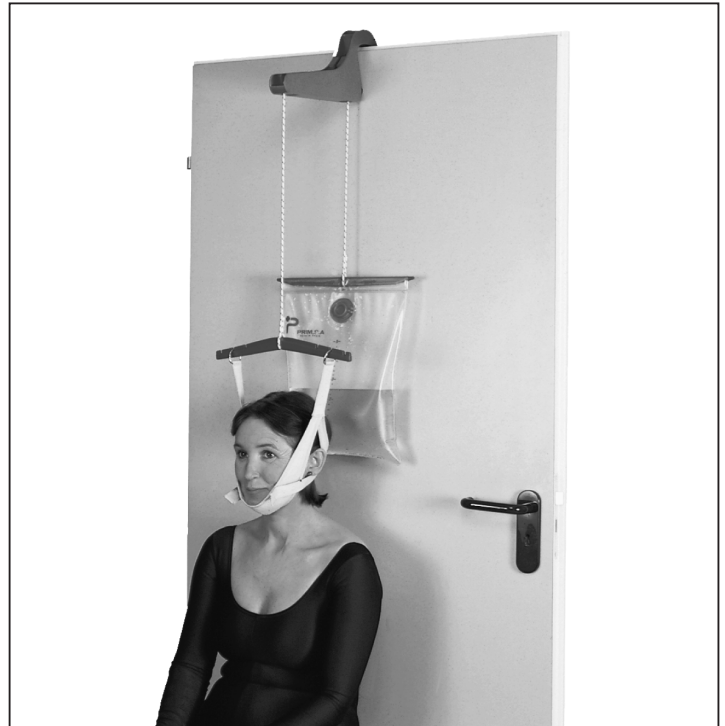

Befestigung an der Tür

Der Aufhängebügel wurde so entwickelt, daß er für alle Türen geeignet ist. Sollte die Tür nämlich zu dick sein, kann dies Problem auf folgende Weise gelöst werden:

- Schieben Sie das Zwischenstück mit der Gummiauflage zur Seite hin aus dem Bügel.
- Schieben Sie jetzt das Gummiteil aus dem Zwischenstück und benutzen Sie dieses wieder für die Öffnung im Bügel.

Das Füllen des Wasserreservoirs

Die Kilogrammangaben ermöglicht Ihnen, um das Gewicht des Wassers einfach abzulesen. Schließen Sie den Sicherheitsverschluß, indem Sie diesen einfach zudrücken.

Achtung:

Beim Abnehmen der Bandage muß das Wasserreservoir unterstützt werden.



WEBSITE BASKO HEALTHCARE: [HTTP://WWW.BASKO.COM](http://www.basko.com)

