

Fajas/ Back supports/ Ceintures/ Corsetti/
Cintas/ Korsetts/ Korsetten/ Korsetter/ Korsetter/
Tukiliivit/ Korsetter/ Orteză lombo-sacrală/
Gorsets/ Поясничный бандаж/ مشد بریم ماکس

PRIM MAX

6032 / 6032G, 6033 / 6033G,
6035 / 6035G, 6037 / 6037G




Instrucciones de adaptación/ Fitting instructions/ Instructions
d'adaptation/ Istruzioni per l'adattamento/ Instruções de
adaptação/ Anleitung/ Montage-instructies/ Utprovningsinstruktion/
Tilpassingsinstruksjon/ Sovitusohjeet/ Tilpasningsinstruktion/ Instrucțiuni
de reglare / Instrukcja obsługi, / Инструкции по адаптации/
تعليمات المستخدم




PRIM

PRIM MAX


1

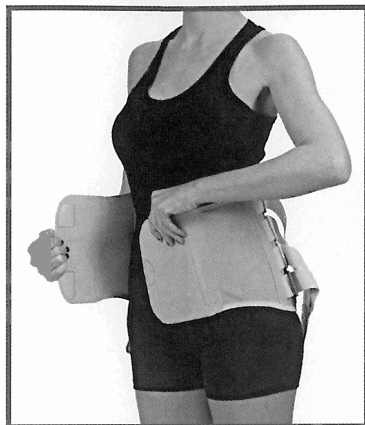


2

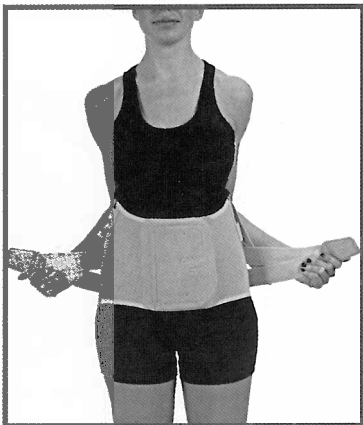

3

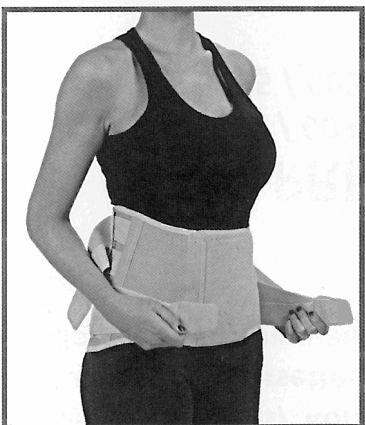

4

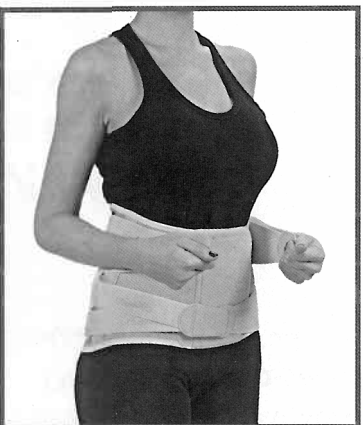

Indikationen:

Sakrallumbale Rückenstützorthese (6032/6032G, 6033/6033G, 6035/6035G): Lumbago, Lumboischialgie, Lumbocruralgie, Bandscheibenarthrose, Bandscheibenerkrankungen, Osteoporose, Osteomalazie, Postoperativer Bandscheibenvorfall.

Dorsolumbale Rückenstützorthese (6037/6037G): Rückenschmerzen durch Osteoarthritis oder kyphotische Haltung, Bandscheibenerkrankungen, Osteolyse, Osteomalazie, degenerativ oder metastatisch bedingter geringer Muskeltonus, stabile Frakturen der thorakolumbalen Region.

Vorsichtsmaßnahmen:

Einen qualifizierter Arzt ist die einzige Person, die die Behandlung verordnen und die Dauer der Behandlung bestimmen kann.

Die Anpassung sollte durch einen qualifizierter Orthopädietechniker durchgeführt werden.

Befolgen Sie die von Ihrem Arzt oder Orthopädietechniker angegebenen Anweisungen in Bezug auf Tragezeiten, um maximale Ergebnisse zu erzielen.

Für Hygiene und Komfort ist es empfehlenswert ein Kleidungsstück aus Baumwolle unter Ihrer Rückenstütze zu tragen.

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand die Bänder, um zu gewährleisten, dass sie frei von Fett oder Schäden sind.

Ein qualifizierter Arzt sollte die Anwendung von topischen Arzneimittel überwachen.

Hinweis für den Techniker:

Überprüfen Sie, dass beim Anbringen der Rückenstütze die Stahlstäbchen im gleichen Abstand auf jeder Seite der Wirbelsäule positioniert sind. Formen Sie die Stahlstäbchen so, dass diese den Kurven der Anatomie des Patienten folgen, oder wie auf dem Rezept oder vom Arzt angegeben.

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse. Platzieren Sie die Rückenstütze in der gewünschten Höhe und wickeln Sie diese ohne Anwendung von Spannung nach vorne und schließen Sie dann den vorderen Klettverschluss.
2. Ergreifen Sie die unteren Band und ziehen Sie diese mit gleichmäßiger Spannung in Richtung der Vorderseite.
3. Überlappen und befestigen Sie den linken Band auf der Oberseite des rechten Band und drücken Sie den unten befindlichen Kletthaken auf den rechten Band in den Stoff der Rückenstütze.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die beiden oberen Bänder.
5. **Dorsolumbale:** Ziehen Sie die langen Band über die Schultern, indem Sie eine ausreichende Spannung ausüben, dass sich der obere Rückenbereich der Rückenstütze dem Rücken anpasst.
6. Kreuzen Sie die Bänder im Rücken und führen Sie sie durch die Schnalle.
7. Ziehen Sie das Band unter Anwendung einer ausreichenden Spannung von hinten nach vorne, um die erforderliche Positionierung und Stützung für den oberen Rücken zu erzielen. Halten Sie eine gleichmäßige Spannung, während Sie die Bänder schließen und drücken Sie den linken Band über und in den rechten Band. Sie können sie entweder über den oberen oder unteren Rückenstützriemen schließen.

Waschanleitung:

Maschinenwäsche 40°. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nicht im Trockner trocknen. Flach trocknen. Nicht hängend trocknen. Schließen Sie vor dem Waschen alle Klettverschlüsse am Gewebe, um zu verhindern, dass offene Haken andere Materialien beschädigen und sich Flusen oder Schmutz in den Haken festsetzen.

Klassifizierung:

Medizinprodukt Klasse I, nicht steril, ohne Messfunktion. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG und ihre Aktualisierung 2007/47/EG.



PRIM



PRIM, S.A.
Pol. Ind. nº1, C/F nº15
28938 Móstoles
Madrid - Spain



IU.445.10/11/2014



PRIM