

Cervical- Extensionsorthese



Die Kopfunterstützung der Cervical-Extensionsorthese basiert auf der mitgelieferten, gepolsterten Mandibulastütze, welche zeitweilig zur Pflege der unteren Gesichtsrregion (Rasur, etc.) und Nahrungsaufnahme entfernt werden kann. Sie besteht aus einer hinteren Polyethylen-Platte mit zwei Druckpolstern - die das Occiput stützen - und einem von vorne einstellbaren Stirnband, welches die Vorneigung des Kopfes verhindert. Das Stirnband bleibt stets richtig positioniert und ist mit Klettverschlüssen versehen.


Wichtige Besonderheiten:

- Nur der Arzt darf die Tragedauer bestimmen.
- Die vom Arzt bestimmten Tagestragezeiten der Orthese sind genau einzuhalten.
- Die Anpassung der Orthese darf in Abstimmung mit dem Arzt nur ein Orthopädietechniker vornehmen.
- Der Gebrauch von extern applizierten Medikamenten, wie z.B. Salben, etc., in Verbindung mit dem Tragen der Orthese, bedarf der Zustimmung des Arztes.
- Die Orthese darf nicht bei Hautirritationen und unterversorgtem oder nekrotischem Hautgewebe eingesetzt werden.
- Aus hygienischen Gründen und für einen besseren Tragekomfort empfehlen wir die Verwendung von speziellen Polsterschläuchen aus Baumwolle.
- In regelmäßigen Abständen ist die Spannung der Bänder zu überprüfen und ggf. nachzuregulieren. Es ist jederzeit sicherzustellen, dass die Orthese sauber und frei von Fett sowie unbeschädigt ist.

REINIGUNGSANLEITUNG:

Alle Oberflächen der Orthese sind mit lauwarmen, leicht seifigem Wasser, per Hand zu reinigen. Die Velcro-Klettbinden sind vor Verunreinigung zu schützen und im Bedarfsfall zu erneuern.

CE
Fabricado por: PRIM, S.A.
Avda. Llano Castellano, 43
28034 Madrid
ESPAÑA

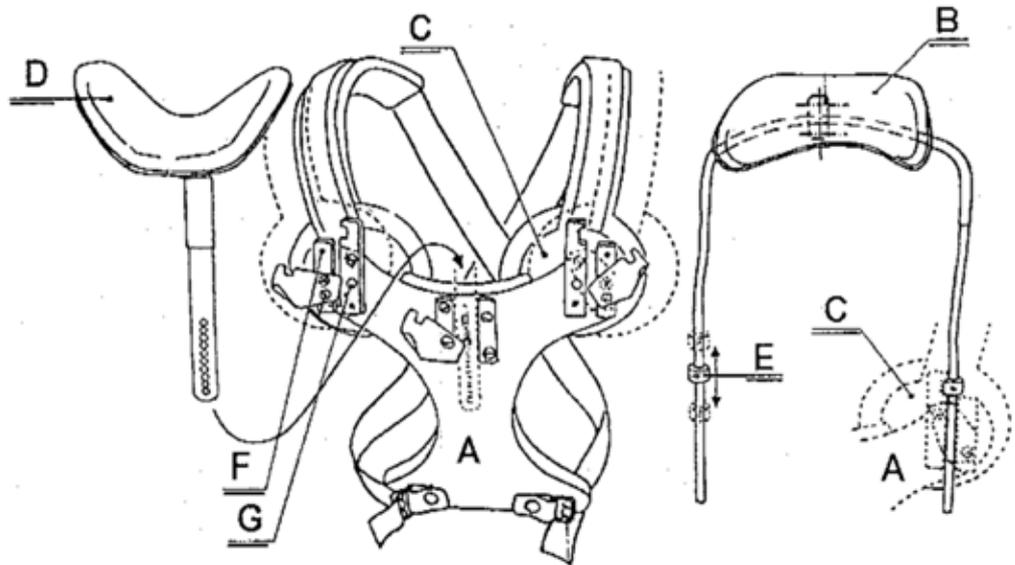

ANPASSUNG DER ORTHESE:

1. Anrichten der Brustplatte A, eventuell ist zur Formgebung das Entfernen der Occiputstütze B erforderlich, ebenso wie das Entfernen der Trägerscheiben C und der Unterstützungsschiene D. Richten Sie die Brustplatte zum Sternum hin durch horizontales Schränken an.
2. Montieren Sie nun die Trägerscheiben C wieder auf die Brustplatte A, wählen Sie hierbei die innere Position für kleinere Patienten, die äußere Position für größere Patienten.
3. Stellen Sie den korrekten Winkel der Schulterträger ein, so dass beide komfortabel in die Senke zwischen Trapezius-Ansatz und Acromium passen. Drehen Sie die Schrauben fest, um die Schulterunterstützungsscheiben zu sichern. Justieren Sie diese in der richtigen Position und setzen Sie die Schrauben in Position F (äußere Positionierung) oder G (innere Positionierung) ein, um die Schulterunterstützung gegen Rotation zu sichern.
4. Ergänzen Sie nun die Kinnstütze D und justieren deren korrekte Höhe. Die Bolzen müssen sauber in die Bohrungen greifen. Markieren Sie die Stellung der Kinnstützschiene, damit sie nach dem Entfernen einfach wieder montiert werden kann. Schließen Sie den Verschluss
5. Passen Sie nun die Occiputstütze B durch Einstellen der Schellen E (Höheneinstellung) an. Achten Sie auf einen guten Sitz der Stütze und die Beibehaltung des korrekten Winkels.

ACHTUNG:

Vorsicht beim Anrichten der Occiputstützschienen. Achten Sie auf Symmetrie!


 Fabricado por: PRIM, S.A.
 Avda. Llano Castellano, 43
 28034 Madrid
 ESPAÑA