


## Anpassung der Bandage durch den Techniker

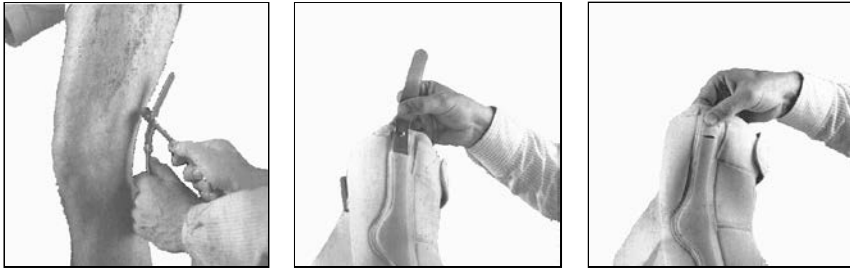

**Abb. 1:** Schieben Sie das polyzentrische Gelenk aus der seitlichen Öffnung der Bandage. Formen Sie die Gelenke entsprechend der Kontur.

**Abb. 2:** Schieben Sie die Gelenke wieder zurück in die Bandage.

**Abb. 3:** Achten Sie darauf, dass die Gelenke voll in die Lasche eingesteckt werden und nicht mehr nach oben rausrutschen können.

## Angabe des verwendeten Materials

Das Material ist komplett latexfrei.

Bandage: Polypropylen, Polyamid, Elastomer, Baumwolle, Polyester.

Gelenkschienen: Aluminium

**CE** Prim  
C/CN. 20 Poligono Industrial N.1  
28938 Mostoles  
Madrid Spain

# Elcross<sup>TM</sup> -Kniebandage mit Klettbindern (Wickelmodell 128)

## Gebrauchsanleitung

---

HMV Pos.-Nr.: 23.04.03.0017 <sup>1)</sup>

Osttarif Pos.-Nr.: 34612-040 <sup>2)</sup>



8805560 / Stand: 03/2018

- <sup>1)</sup> Bei Abrechnung in Deutschland  
<sup>2)</sup> Bei Abrechnung in Österreich

## Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die Kniebandage und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Die Verwendung von äußerlichen Medikationen sollte unter Aufsicht eines Arztes geschehen.

## Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die Kniebandage wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Stabilisierung/ Führung des Kniegelenks eingesetzt. Die weiche und glatte Baumwollfütterung sorgt auch nach längerer Tragedauer für einen angenehm kühlen Effekt. Klettverschlüsse ermöglichen das vollständiges Öffnen der Bandage und damit das einfache An- und Ablegen ohne Kraftaufwand. Die Bandage eignet sich daher besonders für Menschen, die nicht die nötige Kraft oder Greiffunktion für das Anlegen einer geschlossenen Bandage besitzen. Die Kniebandage wird bei folgenden Indikationen angewandt:

- Distorsion
- Reizgelenk
- Osteoarthritis
- Rheumatische Arthritis
- Seitenbandinsuffizienz
- Genu varum
- Genu valgum
- Synovialitis
- Bursitis praepatellaris

## Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Kniebandage darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

## Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Es sind keine Anwendungsrisiken und Kontraindikationen bekannt.

## Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise

Handwäsche mit max. 40°C warmem Wasser. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht geeignet für den Trockner. Bitte schließen Sie die Klettbänder vor dem Waschen, damit herausragende Haken keine Beschädigung am Material verursachen. Auch die Schienen sollten vorm Waschen herausgenommen werden. Lassen Sie die Bandage liegend trocknen. Nicht nass aufhängen.




## Wartungshinweise

Die Klettbänder sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren.


## Zusammenbau- und Montageanweisungen

### Anlegen der Bandage

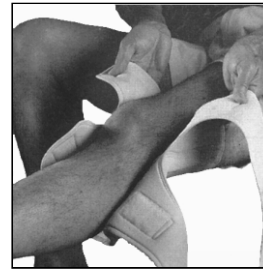


**Abb. 1:** Das Label in der Bandage kennzeichnet die obere Seite der Bandage.


Positionieren Sie die Bandage mit der offenen Seite nach oben auf das gestreckte Bein. Schließen Sie zuerst den Klettverschluss am Oberschenkel und bringen Sie die Bandage auf die gewünschte Spannung.

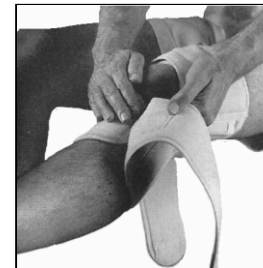

**Abb. 2:** Halten Sie das Bein noch immer gestreckt und positionieren Sie jetzt das Klettband am Unterschenkel bis die gewünschte Spannung erreicht ist.

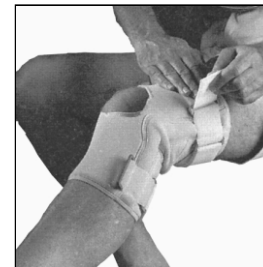

**Abb. 3** Kontrollieren Sie, ob die Gelenkachsen innen und außen auf gleicher Höhe zur Kniemitte ausgerichtet sind und gegen das Knie liegen.

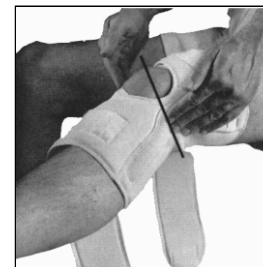

**Abb. 4:** Führen Sie nun die vorderen und unteren Oberschenkelbänder durch die Schlaufen. Damit kann die zirkuläre Bandagenspannung individuell nachgestellt werden. Wiederholen Sie die gleichen Schritte bei den Unterschenkelbändern.