

Reinigingsvoorschriften (NL)

Sluit voor het wassen alle klittenbanden ter voorkoming van beschadigingen aan andere kledingstukken en voor een optimale hechting van de klittenbanden.

LET OP: controleer het haakklittenband regelmatig op vervuiling door stofjes en draadjes van andere kledingstukken.

Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise (DE)

Handwäsche mit max. 40°C-warmem Wasser. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht geeignet für den Trockner. Vor dem Waschen bitte alle Klettverschlüsse schließen, so dass das Hakenklettband andere Materialien nicht beschädigen kann und eine optimale Haftung des Klettbands garantiert bleibt.




Maattabel / Maßtabelle

Wrist Lacer 2.0 lengte / länge 20,5 cm			Wrist Lacer 2.0 lengte / länge 26,5 cm		
Art.-Nr.	Maat / Größe	Omvang / Umfang	Art.-Nr.	Maat / Größe	Omvang / Umfang
8239.2 L/R-XXS	XX-Small	< 12 cm	82395.2 L/R-XXS	XX-Small	< 12 cm
8239.2 L/R-XS	X-Small	12 - 14 cm	82395.2 L/R-XS	X-Small	12 - 14 cm
8239.2 L/R-S	Small	14 - 16 cm	82395.2 L/R-S	Small	14 - 16 cm
8239.2 L/R-M	Medium	16 - 18 cm	82395.2 L/R-M	Medium	16 - 18 cm
8239.2 L/R-L	Large	18 - 20 cm	82395.2 L/R-L	Large	18 - 20 cm
8239.2 L/R-XL	X-Large	20 - 22 cm	82395.2 L/R-XL	X-Large	20 - 22 cm

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de pols

Maßnehmen: zirkulär, an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks

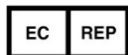

MDSS GMBH
SCHIFFGRABEN 41
30175 HANNOVER, GERMANY



Manufactured by:
Medical Specialties Inc.
4600 Lebanon Road
Charlotte NC28227 USA

8500103 / Stand: 10/2020

WRIST LACER 2.0 ORTHESE



Polsorthese | Gebruiksaanwijzing
Handgelenkorthese | Gebrauchsanleitung

Gebruiksrichtlijnen

Uw arts is degene die de polsorthese heeft voorgeschreven en de behandelduur bepaald. De gestelde dagelijkse gebruiksduur dient nauwkeurig nageleefd te worden. Controleer regelmatig uw huid op drukplekken of andere irritaties en neem direct contact op met uw arts of instrumentmaker indien dit wel het geval is.

Beoogd gebruik van het product / Indicaties

Deze polsorthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve als ook voor postoperatieve behandeling. Deze orthese is met name geschikt voor reumatische aandoeningen. De orthese is geschikt om bij onderstaande indicaties Ingezet te worden:

- Verstuikingen
- Carpaal tunnel syndroom
- Medianus compressiesyndroom
- Reumatische artritis
- Radiale parese
- Distorsie

Extra productinformatie / inzetgebied

De polsorthese is niet geschikt om in zout water gebruikt te worden.

Gebruikersrisico's en contra-indicaties

Er zijn geen gebruikersrisico's of contra indicaties bekend

Onderhoudsadvies

De klittenbanden dienen vrij te blijven van vervuiling, stofresten e.d. om een goede hechting te blijven garanderen.

Samenstellen- en montagerichtlijnen

Aanleggen van de orthese

Neem de orthese uit de verpakking en open de klittenbanden van de orthese.

Afb. A: Trek de orthese aan als een handschoen door deze over uw hand te schuiven. De metalen balein dient aan de binnenzijde tegen de handpalm aan te liggen.

Afb. B: Sluit nu de klittenband om de duim op de gewenste spanning en zet deze vast aan het lusmateriaal

Afb. C: Pak vervolgens het brede klittenbanddeel wat aan het vetersysteem vast zit en trek dit circulair om de pols en maak zodoende de orthese vast.

De orthese dient zo gesloten te worden dat het polsgewricht en middenhands-beentjes ondersteunt zijn. Let er op dat er geen drukplekken kunnen ontstaan.

Gebruikte materialen

Orthese-buitenzijde: geperforeerd kunststof suède
Voering: polypropyleen vilt
Baleinhoesjes: nylon



Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die Handgelenksorthese und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt und Techniker.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die Handgelenksorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und unterstützt das schmerzende Handgelenk. Besonders geeignet ist die Anwendung bei Rheumaerkrankungen. Die Anwendung erfolgt bei folgenden Indikationen:

- Weichteilirritation
- Karpaltunnelsyndrom
- Medianuskompressionssyndrom
- Arthritis, rheumatoide
- Radialislähmung
- Distorsion

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Handgelenksorthese darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Es sind keine Anwendungsrisiken und Kontraindikationen bekannt.

Wartungshinweise

Die Klettbander sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren

Zusammenbau- und Montageanweisungen

Anlegen der Orthese

Nehmen Sie die Orthese aus der Verpackung, und öffnen Sie die Klettverschlüsse.

Abb. A: Schlüpfen Sie mit der Hand unter das Strickgewebe in die Orthese hinein. Die feste Metallschiene sollte auf der Handinnenseite anliegen.

Abb. B: Schließen Sie nun den Klettverschluss um den Daumen und befestigen Sie ihn auf dem Flauschgewebe.

Abb. C: Ziehen Sie nun die Orthese mit dem breiten Klettverschluss, der am Ende der Schnürung angebracht ist, über die Innenseite des Handgelenks fest.

Die Orthese sollte so fest sitzen, dass das Handgelenk und die Fingergrundgelenke ruhiggestellt sind. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Druckstellen kommt.

Angabe des verwendeten Materials

Orthesen-Außenseite: perforiertes Kunststoffwildleder
Polster: Polypropylen-Filz
Nylon-Taschen