

C | S



ELEMENTS

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Indikationen / Zweckbestimmung

Dieses Produkt dient zur Behandlung von Plantarfasziitis. Der Strumpf sollte während der Nacht oder in Ruhe zu jedem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Der Strumpf ist nur für die Verwendung an einer Person vorgesehen.

Kontraindikationen

Kreislaufbeschwerden, offene Wunden an Unterschenkel oder Fuß, Diabetes, Hautprobleme oder während der Schwangerschaft. Ausgeprägtes Ödem, starke Schwellungen. Sollte nicht direkt nach jeder Art von Chirurgie am Bein oder Fuß verwendet werden.

Anpassungen

Dieses Produkt darf nur durch eine medizinische Fachkraft angepasst werden.

Achtung

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe verwenden. Einige Beschwerden können zu einem Anschwellen führen, wodurch unterschiedliche Größen erforderlich sind. Wenn Sie diesen Strumpf zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, dass Sie langsam beginnen. Verwenden Sie den Strumpf am ersten Tag nur für einen kurzen Zeitraum

und erhöhen Sie anschließend die Tragezeit schrittweise. Der Strumpf darf nicht direkt mit offenen Wunden in Berührung kommen. Verwenden Sie den Strumpf nur auf trockener Haut. Tragen Sie keine Lotion auf Ihre Haut auf. Stellen Sie sicher, dass die Bänder nicht zu fest angezogen sind. Sollten Sie Zeichen einer Hautreizung erkennen, entfernen Sie den Strumpf umgehend. Prüfen Sie täglich den Zustand Ihrer Haut.

Material

Dieses Produkt besteht aus: 100% Spandex. Dieses Produkt enthält kein Latex und ist nicht flammbeständig.

Waschanleitung





Alle Velcro-Klettverschlüsse vor der Wäsche schließen. Maschinenwaschbar bis 40 °. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Liegend trocknen. Nicht in den Trockner geben oder chemisch reinigen. Mit ähnlichen Farben waschen.

Kontakt

Sollten Probleme auftreten, entfernen Sie den Strumpf und wenden Sie sich an Ihren Arzt, Techniker oder Händler, der Ihnen diesen Strumpf verordnet oder angepasst hat.

Anlegen der Bandag

1. Überprüfen Sie, ob der Strumpf komplett und unbeschädigt ist.
2. Öffnen Sie die Klettverschlüsse.
3. Ziehen Sie den Strumpf über das Bein. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und ohne Falten ist.
4. Befestigen Sie den Klettverschluss um das Bein unter dem Knie.
5. Führen Sie das lange Band durch die Schlaufe, um die Fußsohle schmerzfrei zu dehnen. Schließen Sie den Klettverschluss. Starten Sie die Behandlung durch Ziehen, bis die Zehen ca. 1 cm vom Boden abheben. Erhöhen Sie langsam den Zug bis ein max. Abstand von 2,5 cm zwischen den Zehen und dem Boden erreicht wird.
6. Passen Sie den Strumpf bequem an.

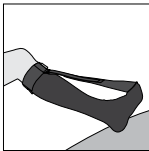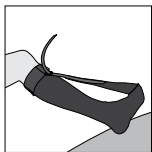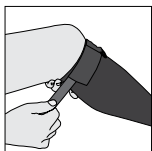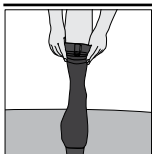

Lees voor het in gebruik nemen van de bandage eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.

Indicaties / beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor de behandeling van Fasciitis plantaris. De sok dient 's nachts gedragen te worden of op ieder ander tijdstip van rust. Gebruik is bedoeld door slechts één persoon.

Contra-indicaties

Circulatieproblemen, open wonden op onderbeen of voet, diabetes, huidproblemen of zwangerschap. Ernstige oedeem of zwellingen. Niet direct na elke vorm van chirurgie in been of voet gebruiken.

Aanpassingen

Dit product dient alleen aangepast te worden door een daartoe bevoegd persoon.

Waarschuwing

Controleer eerst of u de juiste maat heeft. Sommige aandoeningen kunnen gepaard gaan met zwellingen wat tot variatie in maatvoering kan leiden. Indien u de bandage voor de eerste maal gebruikt is het belangrijk dat u rustig aan begint. Draag de bandage eerst een kort deel van de dag en voer de dagelijkse gebruiksduur langzaam

op. De bandage mag niet in direct contact komen met open wonden en dient op een droge huid gedragen te worden. Gebruik geen lotion op de huid. Zorg dat de banden niet te strak zitten. Indien er tekenen zijn van huidirritatie dient de bandage direct verwijderd te worden. Controleer dagelijks de conditie van de huid.

Materiaal specificaties




Dit product bevat: 100% Spandex en bevat geen Latex. Dit product is niet brandvertragend behandeld.

Reinigingsinstructies

Sluit alle klittenbanden voor het wassen. Geschikt voor de wasmachine tot 40°C. Gebruik een waszakje en laat de bandage liggend drogen. Niet in de droger en niet chemisch reinigen.


Contact opnemen

Indien zich problemen voordoen dient u het gebruik te staken en contact op te nemen met uw instrumentmaker of firma waarbij u de bandage heeft aangeschaft.

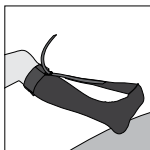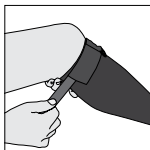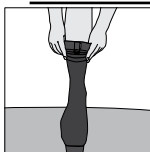



Instructies voor gebruik

1. Controleer of de bandage compleet is en onbeschadigd.
2. Open de klittenbanden.
3. Trek de sok over het been. Zorg ervoor dat het oppervlak glad is, zonder rimpels.
4. Bevestig het klittenband om het been onder de knie.
5. Voer de lange band door de lus en breng de voetzool op spanning zonder dat het pijnlijk wordt. Sluit de klittenband. Start de behandeling door te trekken aan de voorste band tot de tenen ca. 1 cm van de vloer zijn. Voer spanning geleidelijk op – tot maximaal 2,5 cm afstand tussen de tenen en vloer.
6. Pas aan voor comfort.

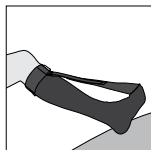

Item No	Size	Calf Circumference
34108 0011	Small	< 20 cm
34108 0012	Medium	20 - 40 cm
34108 0013	Large	> 40 cm

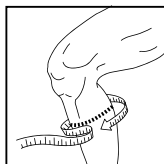


 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
 SE-254 67 Helsingborg, Sweden
 Phone +46 42 25 27 01

