

## Artikeloverzicht en maten Stomacare

Stomacare bandages						Maattabel (voor alle modellen)			
Standaard modellen						Maat	Buikomvang		
Artikelnummer			Hoogte	Diameter stoma opening	Zijde stoma opening				
Kleur wit	Kleur beige	Kleur zwart							
308	B308	G308	10 cm	Ø 60 mm <sup>1)</sup>	universeel			S	70 - 79 cm
309	B309	G309	10 cm	Ø 72 mm <sup>2)</sup>	universeel			M	80 - 89 cm
304	B304	G304	10 cm	Ø individueel aanpasbaar	universeel				
306	B306	G306	15 cm	Ø 60 mm <sup>1)</sup>	universeel				
307	B307	G307	15 cm	Ø 72 mm <sup>2)</sup>	universeel				
312	B312	G312	15 cm	Ø 85 mm <sup>3)</sup>	universeel				
305	B305	G305	15 cm	Ø individueel aanpasbaar	universeel			L	90 - 99 cm
302	B302	G302	22,5 cm	Ø 60 mm <sup>1)</sup>	links of rechts			XL	100 - 109 cm
303	B303	G303	22,5 cm	Ø 72 mm <sup>2)</sup>	links of rechts				
313	B313	G313	22,5 cm	Ø 85 mm <sup>3)</sup>	links of rechts				
301	B301	G301	22,5 cm	Ø individueel aanpasbaar	links of rechts				
EasyOpener modellen						XXL	110 - 120 cm		
Artikelnummer			Hoogte	Maat stoma opening	Zijde stoma opening				
Kleur wit	Kleur beige	Kleur zwart							
306EO	B306EO	G306EO	15 cm	Ø 60 mm <sup>1)</sup>	links of rechts				
307EO	B307EO	G307EO	15 cm	Ø 72 mm <sup>2)</sup>	links of rechts	XXXL	121 - 130 cm		
312EO	B312EO	G312EO	15 cm	Ø 85 mm <sup>3)</sup>	links of rechts				
EasyCut modellen						XXXXL	131 - 140 cm		
Artikelnummer			Hoogte	Maat stoma opening	Zijde stoma opening				
Kleur wit	Kleur grijs								
326	326.1		10 cm	Positie, vorm en maat kunnen individueel worden bepaald.	universeel				
327	327.1		15 cm		universeel				
328	328.1		22,5 cm		links of rechts				

### Bijpassende borgring maten

<sup>1)</sup> Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm

<sup>2)</sup> Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm

<sup>3)</sup> Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Stomacare accessoires					
Artikelnummer					
Kleur grijs/zilver	Hoogte	Stoma opening	Artikelomschrijving	Maat	Buikomvang
365	11/21 cm	geen	Stomacare HydroActive (zwembandage)	S tot XXXXL	zie maattabel boven
Artikelnummer					
Kleur wit	Kleur zwart	Kleur grijs	Artikelomschrijving	Maat	
-	G300	300.1	Stomacare Protector	universeel voor alle Stomacare bandages	
390	G390	390.1	Stomacare BellyBag		

## Stomacare

## Bandages voor stomadragers



## Stomacare bandage modellen

De Stomacare bandages worden postoperatief ingezet ter ondersteuning van de buikwand, ter voorkoming of ter ondersteuning van een breuk en preventief bij prolapsvorming (uitstulping van de darm door het stoma). Ook kan de Stomacare bandage gebruikt worden ter bescherming van het stoma tijdens het sporten of ter ondersteuning van de buikwand bij zwaardere werkzaamheden zoals stofzuigen, de tuin spitten etc.



### Standaard modellen

Afgestemd op de individuele behoeften en voorzien van een geïntegreerde stoma opening. De Standaard modellen zijn leverbaar in verschillende hoogtes en kleuren.



### EasyCut modellen

De positie, diameter en vorm kunnen eenvoudig met een schaar aangebracht worden. Het materiaal rafelt niet en is voldoende stug voor optimale ondersteuning.



### EasyOpener modellen

Comfort bij wisselen van het stomazakje. Door een tweede geïntegreerde sluiting onder de stoma opening hoeft de bandage niet eerst verwijderd hoeft te worden.



### HydroActive modellen

Bandages gemaakt van een luchtdoorlatend neopreen en speciaal als zwembandage of voor gebruik in water ontwikkeld. Geschikt voor zowel zoet als zout water.

Voor een volledig artikeloverzicht en de beschikbare maten, kleuren hoogtes en overige kenmerken zie ommezijde.



## Stomacare accessoires



### Stomacare Protector

Biedt extra veiligheid aan de stoma tijdens het sporten. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden om het drukgevoel, veroorzaakt door de autogordel tegen te gaan.



### Stomacare BellyBag

De Bellybag is een handig accessoire en biedt extra ondersteuning aan het stomazakje en zorgt voor meer draagcomfort, met name bij lichamelijke activiteiten.

## Beoogd gebruik

<b>Hulpmiddel</b>	: Stomacare bandage (Basko Healthcare)
<b>Z-Index</b>	: zie <a href="http://basko.com">basko.com</a>
<b>Indicaties</b>	: buikwandzwakte en / of een hernia in litteken of stoma omgeving en / of prolapsvorming.
<b>Stomasysteem</b>	: voor het bepalen van de juiste diameter van de opening is de buitenste flensmaat van het betreffende systeem maatbepalend.

## Gebruikersinformatie

De Stomacare bandage wordt bij voorkeur in liggende houding aangemeten / aangepast en zodanig aangetrokken dat men er de hand nog tussen kan schuiven. De bandage zit dan voldoende strak om steun te geven maar draagt toch comfortabel.

Het is belangrijk om de bandage te dragen tijdens inspanningen waarbij de druk op de buikwand is verhoogd, zoals stofzuigen, tillen, tuinieren en sporten. Ook wanneer men een slappe buikwand heeft, last heeft van hoesten of wanneer men moet overgeven, biedt de bandage ondersteuning. Samen met de Protector beschermkap biedt de Stomacare bandage een optimale bescherming voor uw stoma.

Ter bevordering van de levensduur van de bandage is het belangrijk om deze regelmatig te wisselen en te wassen. De Stomacare bandage kunt u op 30° C wassen in een waszakje in de wasmachine. Het is belangrijk de klittenbandsluitingen voor het wassen te sluiten om te voorkomen dat er pluusjes en draadjes aan het klittenband hechten en dat andere kledingstukken worden beschadigd. Het gebruik van wasverzachter wordt ontraden. De Stomacare bandage niet drogen in de droger of op de verwarming.

Wanneer de bandage niet gedragen wordt is het belangrijk deze met de sluitingen gesloten op te bergen. Daardoor blijft het klittenband schoon en goed hechtend.

Overgevoeligheid voor de materialen van Stomacare bandages komt zeer weinig voor (samenstelling van de bandage: polyester, lycra, katoen en EVA). In een enkel uitzonderlijk geval kan er wat huidirritatie ontstaan door het dragen van de bandage. Dit is op te lossen door de bandage over een katoenen hemd te dragen.

Voor een hoog draagcomfort,  
een veilig en zeker gevoel in het dagelijkse leven.