


Maattabel

P.E.A.care spalk "Basic" en "Basic Quick Release"

Artikelnummer "Basic"	Artikelnummer "Basic Quick Release"	Maat	Spalkbreedte	Schouderbreedte
2800-1	2810-1	Maat 1	22 tot 29 cm	185 tot 260 mm
2800-2	2810-2	Maat 2	27 tot 40 cm	245 tot 370 mm

Maatnemen: de correcte maat wordt bepaald door de schouderbreedte.

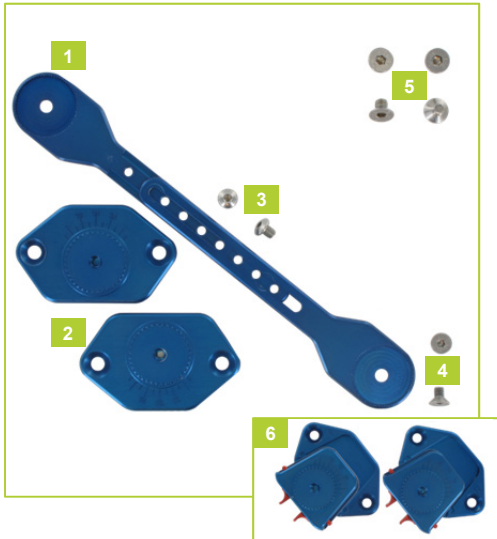

Hoofdbestanddelen "Basic"		
Nr.	Artikelomschrijving	Art. nr.
1	Basisspalk	2802-1/-2
2	Voetplaten	2801
3	Stelschroeven (M5 x 6)	2826
4	Voetplaatschroeven (M5 x 8)	2827
5	Schoenmontage schroeven (M6 x 8)	2825
Accessoire voor de "Basic"		
Nr.	Artikelomschrijving	Art. nr.
6	Quick Release-Kit	2819

Hoofdbestanddelen "Basic Quick Release"		
Nr.	Artikelomschrijving	Art. nr.
1	Basisspalk	2802-1/-2
2	Voetplaatconnector	2824
3	Voetplaten	2823
4	Stelschroeven (M5 x 6)	2826
5	Voetplaatschroeven (M5 x 8)	2827
6	Schoenmontage schroeven (M6 x 8)	2825

Basko
Healthcare

P.E.A.care spalk


Gebruiksaanwijzing voor technici



Modellen:

"Basic"

"Basic Quick Release"

 Basko Healthcare
P. Liefinckweg 16
NL 1505 HX Zaandam
Phone +31 75 613 15 13

 **Basko**
Healthcare

NEDERLAND

Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 40 - 85 41 87-0
Fax: +49 (0) 40 - 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

ÖSTERREICH

Tel.: +43 (0) 1 - 2 83 53 30
Fax: +43 (0) 1 - 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

BELGIË

Tel.: +32 (0) 2 - 582 82 50
Fax: +32 (0) 2 - 582 61 12
E-mail: info@dirame.com

basko.com

8500706 / Stand: 09/2012

basko.com

Gebruik en toepassing

Uw arts is degene die de P.E.A.care spalk voorschrijft en de duur van de behandeling bepaalt. De voorgeschreven dagelijkse gebruiksduur dient strikt opgevolgd te worden. Het gebruik van medicinale zalf en/of crème dient onder toezicht van een arts te gebeuren.

Het gekwalificeerde personeel dat de spalk aanmeet is verantwoordelijk voor de juiste pasvorm en functionaliteit van de orthese. In het geval van huidirritatie, ongewone pijn of andere complicaties die geassocieerd kunnen worden met het product kunt u contact opnemen met de behandelend arts en/of de leverancier.

Beoogd gebruik / indicaties

De P.E.A.care spalk wordt ingezet bij de behandeling van een klompvoet o.a. volgens de "Ponseti" methode. De P.E.A.care spalk is slechts een orthesecomponent. Een complete orthese bestaat uit een P.E.A.care spalk met op de uiteinden Mendivil orthesen schoenen gemonteerd. De voeten worden vervolgens in de noodzakelijke exorotatie stand gezet en de spalk gelijk aan de schouderbreedte ingesteld. Daarmee wordt de eerder verkregen correctie van de voet behouden en een terugval tegengegaan.

Gebruik gebeurt bij de volgende indicatie:

- Pes equinovares (klompvoet) (ICD10: Q66.8 / M21.57)

Overige gebruiksvoorwaarden / Inzetgebied

De spalk mag niet worden gebruikt in zout water.

Bestaande gebruiksrisico's en contra-indicaties

De spalk mag niet op een gekneusde of geïrriteerde huid worden gedragen. Verder zijn er geen risico's of contra-indicaties bekend.

Onderhoudsvoorschriften

Controleer de spalk regelmatig op slijtage rond de scharnieren en de snelkoppeling (Quick Release).

Gebruikte materialen

Spalk en voetplaten: aluminium

Reiniging en desinfectie instructies

Reinig de orthese met een zachte doek en max. 40°C warm water. Niet bleken. Niet chemisch reinigen. Niet geschikt voor gebruik in de wasdroger.

Montagehandleiding voor de P.E.A.care Basic en Basic Quick Release

Controleer eerst de inhoud van de verpakking:

- 1) P.E.A.care spalk
- 2) Zakje met 2 inbussleutels en 4 schroeven
- 3) Technische gebruiksaanwijzing
- 4) Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Aanmeten van de spalk

Stap 1

Meet de schouderbreedte van het kind (*Afb. 1*) en bepaal daarmee de overeenkomstige maat van de spalk (zie maattabel).

Stap 2

Instellen op de schouderbreedte:

Draai met de inbussleutel de stelschroeven los (*Afb. 2a*). Draai de spalk om en schuif de spalk op de schouderbreedte afstand (hart tot hart van de schroeven) (*Afb. 2b*). Plaats de stelschroeven zo ver mogelijk uit elkaar en schroef ze weer vast.

Stap 3

Draai met de inbussleutel de schroeven van de voetplaten los en verwijder de voetplaten (*Afb. 3*).

Stap 4

Indien u een dorsaalflexie stand in de spalk wilt aanbrengen (volgens Ponseti), buigt u met ijzers de spalk in de gewenste hoek. (*Afb. 4*).

Stap 5

Monteer de (exorotatie) voetplaten met de meegeleverde schroeven op de zool van de (Mendivil) schoen (*Afb. 5*).

Let op: de gradenboog dient altijd aan de laterale zijde van de schoen gepositioneerd te zijn.

Stap 6

Instellen van de abductiehoek:



Op de voetplaat bevindt zich een gradenboog. Positioneer de voetplaat in de gewenste hoek op de basisspalk en gebruik de markering op de basisspalk als referentie en richtpunt (*Afb. 6*). Schroef nu de voetplaat vast op de spalk.

Stap 7

Herhaal stap 6 aan de andere zijde van de spalk.

Stap 8 (alleen voor de Basic Quick Release)

Controleer de werking van de Quick Release functie (snelkoppeling). Schuif de schoen met de voetplaat zijdelings tegen de voetplaatconnector. Druk en klik deze nu vast (*Afb. 7*). Om de schoen te ontgrendelen moeten de twee rode ontkoppelknopen samengedrukt worden en vervolgens schuift u de schoen met voetplaat zijdelings van de connector af.

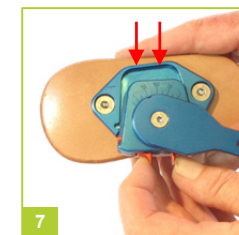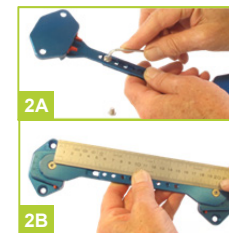

Maattabel

P.E.A.care spalk "Dynamic Quick Release"

Artikelnummer "Dynamic Quick Release"	Maat	Spalkbreedte	Schouderbreedte
2820-1	Maat 1	20 cm	tot 180 mm
2820-2	Maat 2	25 cm	180 tot 230 mm
2820-3	Maat 3	30 cm	230 tot 280 mm
2820-4	Maat 4	35 cm	280 tot 330 mm
2820-5	Maat 5	40 cm	330 tot 380 mm

Maatnemen: de correcte maat wordt bepaald door de schouderbreedte.



Hoofdbestanddelen „Dynamic Quick Release“		
Nr.	Artikelomschrijving	Art. nr.
1	Basisspalk	2821-1 bis -5
2	Instelbare voetplaatconnector	2822
3	Voetplaten	2823
4	Schoenmontage schroeven (M6 x 8)	2825

Basko
Healthcare


P.E.A.care spalk

Gebruiksaanwijzing voor technici



Model:

"Dynamic Quick Release"

 Basko Healthcare
P. Liefinckweg 16
NL 1505 HX Zaandam
Phone +31 75 613 15 13

 **Basko**
Healthcare

NEDERLAND

Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 40-85 41 87-0
Fax: +49 (0) 40-85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

ÖSTERREICH

Tel.: +43 (0) 1 - 2 83 53 30
Fax: +43 (0) 1 - 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

BELGIË

Tel.: +32 (0) 2 - 582 82 50
Fax: +32 (0) 2 - 582 61 12
E-mail: info@dirame.com

Gebruik en toepassing

Uw arts is degene die de P.E.A.care spalk voorschrijft en de duur van de behandeling bepaalt. De voorgeschreven dagelijkse gebruiksduur dient strikt opgevolgd te worden. Het gebruik van medicinale zalf en/of crème dient onder toezicht van een arts te gebeuren.

Het gekwalificeerde personeel dat de spalk aanmeet is verantwoordelijk voor de juiste pasvorm en functionaliteit van de orthese. In het geval van huidirritatie, ongewone pijn of andere complicaties die geassocieerd kunnen worden met het product kunt u contact opnemen met de behandelend arts en/of de leverancier.

Beoogd gebruik / indicaties

De P.E.A.care spalk wordt ingezet bij de behandeling van een klompvoet o.a. volgens de "Ponseti" methode. De P.E.A.care spalk is slechts een orthesecomponent. Een complete orthese bestaat uit een P.E.A.care spalk met op de uiteinden Mendivil orthesen schoenen gemonteerd. De voeten worden vervolgens in de noodzakelijke exorotatie stand gezet en de spalk gelijk aan de schouderbreedte ingesteld. Daarmee wordt de eerder verkregen correctie van de voet behouden en een terugval tegengegaan.

Gebruik gebeurt bij de volgende indicatie:

- Pes equinovares (klompvoet) (ICD10: Q66.8 / M21.57)

Overige gebruiksvoorwaarden / Inzetgebied

De spalk mag niet worden gebruikt in zout water.

Bestaande gebruiksrisico's en contra-indicaties

De spalk mag niet op een gekneusde of geïrriteerde huid worden gedragen. Verder zijn er geen risico's of contra-indicaties bekend.

Onderhoudsvoorschriften

Controleer de spalk regelmatig op slijtage rond de scharnieren en de snelkoppeling (Quick Release).

Gebruikte materialen

Spalk en voetplaten: aluminium

Reiniging en desinfectie instructies

Reinig de orthese met een zachte doek en max. 40°C warm water. Niet bleken. Niet chemisch reinigen. Niet geschikt voor gebruik in de wasdroger.

Montagehandleiding voor de P.E.A.care Dynamic Quick Release

Controleer eerst de inhoud van de verpakking:

- 1) P.E.A.care spalk
- 2) Zakje met 2 inbussleutels en 4 schroeven
- 3) Technische gebruiksaanwijzing
- 4) Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Aanmeten van de spalk

Stap 1

Meet de schouderbreedte van het kind (*Afb. 1*) en bepaal daarmee de overeenkomstige maat van de spalk (zie maattabel).

Stap 2

Instellen op de schouderbreedte:

Draai met de inbussleutel de schroeven van de buisklemmen los en stel ze in op de gemeten schouderbreedte (hart op hart). Draai de schroeven van de buisklemmen weer vast (*Afb. 2*).

Stap 3

Instellen van de abductiehoek:

Druk de twee rode ontkoppelknopen samen en schuif de voetplaat zijdelings van de connector af (*Afb. 3*). Draai met de inbussleutel de vier schroeven op de connector los (twee draaiingen per schroef volstaat) (*Afb. 4*). Op de connector bevindt zich een gradenboog. Plaats de connector in de gewenste stand en gebruik de markering op de zijkant van de basisspalk als referentie en richtpunt (*Afb. 5*). Draai de schroeven lichtjes vast.

Stap 4

Indien u een dorsaalflexie stand in de spalk wilt aanbrengen (volgens Ponseti), plaatst u nu het kogelgewricht in de gewenste stand (*Afb. 6*).

Stap 5

Draai nu de 4 schroeven allemaal vast en let daarbij op dat de dorsaalflexie en abductiehoek niet verandert.

Stap 6

Herhaal de stappen 3, 4 en 5 aan de andere zijde van de spalk.

Stap 7

Monteer de voetplaten met de meegeleverde schroeven op de zool van de (Mendivil) schoen (*Afb. 7*).

Stap 8

Controleer de werking van de Quick Release functie (snelkoppeling). Schuif de schoen met de voetplaat zijdelings tegen de voetplaatconnector. Druk en klik deze nu vast (*Afb. 8*). Om de schoen te ontgrendelen moeten de twee rode ontkoppelknopen samengedrukt worden en vervolgens schuift u de schoen met voetplaat zijdelings van de connector af.

